

OPERATIONSTEKNIK COVISION HEMI PROTES SNABBGUIDE



*Sågguide till collum 45°
(08.5129)*



*Öppnande av märkekanalen med
exmpelvis Osteotom, Boxmejsel
eller Reamer*



Utslags-/Riktpinne (08.0501)



*Rasp/Provstam 5,0; 7,5; 10,0; 11,25; 12,25; 13,75 och 15 mm.
(08.5147 – 08.5153)*



Rasphandtag (08.0563)




Utrymning av margkanalen och bestammande av anteversion med raspar/provstammar (08.5147 – 08.5153). Utslags/Riktpinne (08.0501) saknas pa bilden



Rasphandtag (08.0563) och Rasp/Provstam (08.5147 -08.5153) Utslags/Riktpinne (08.0501) saknas pa bilden



Rasp/Provstam ratt nedslagen med flansen i niva med osteotomin

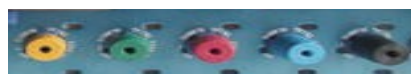

Provhalslangdshylsor gul -3; gron +0; rod +4; bla +8; svart +12 mm (08.0523 – 08.0527)



*Exempel: Provhylsa blå
+8 mm (08.0526)*



Utdragare för provhylsor och implantathylsor (08.0534)



*Provhuvud Ø 42 – 58 mm
(08.0577 – 08.0585)*



Handtag till Provhuvud. Röd fast hylsa på gängorna. (08.0598)



Staminförare med oval tapp (08.0565)



*Utprovning av
huvuddiameter med
Provhuvud (08.0577 -
08.0585) och Handtag till
Provhuvud (08.0598)*




*Utprovning av halslängd
med Provhuvud och
Provhylsa. På bilden visas
provhylsa Röd + 4 mm*



*Införandet av stammen med
Staminförare med oval tapp
(08.0565)*



*Implantathylsa
(02.8903 - 02.8912)*

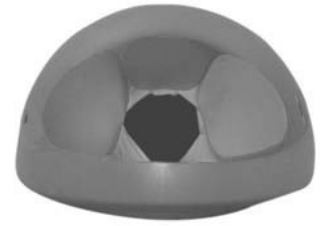

*Implantathuvud 42 – 58 mm
(02.8942 - 02.8958)*



*Sammansättning av Huvud
och Hylsa och Stam*



Påslagning av Hemihuvud